

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300381
作業年月日	平成 28 年 10 月 20 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	金木内科クリニック 様	TEL： 026-226-3553
所在地	長野市安茂里1820	ご担当 金木 様
販売店	協和医科器械株式会社	ご担当 北澤 様
納入年月日	平成 26 年 10 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	Ver 0205/T02C
異常履歴なし	

不具合原因、作業内容	保守点検作業実施
------------	----------

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 610
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
給水フィルター	☐		排水フィルター	☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	異常ありませんでした。引き続き、使用後の自己洗浄・清拭をお願いします。 （用平洗淨剤） （オウゴン） （2本） （製品） （殺菌） （協和医科器械（株）） （依頼分）
---------------------------	--

装置情報	交換後運転回数： 224	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 3	殺菌/消毒+7L： 481
	リークチェック： 450	自己洗浄： 327	7Lコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
ポンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	金木内科クリニック ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.10.20 金木 調	H28.10.20 金木 調