

C 作業報告書

依頼者 成田市急病診療所 様	ご承認印 木村
住所 千葉県成田市赤坂1-3-1	
TEL 047-627-1116	業名 消毒室
機種名 ホトケル-7	メーカー (株)IH177テック
型式 BC-17	製造番号 13100066
継続	有料
無料	運転回数 1812 回

ご依頼内容・現象

定期保守点検

(ご依頼者 様)

原因

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)☐ 各部増締め☐ 分解・再セットアップ☐ 各部清拭☐ グリスアップ☒ 動作確認☐ 設定・プログラムの確認☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)☐ 性能検査立ち会い☒ 試運転☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 20 年 2 月 10 日

保守 形態	1 保守 契約	2 点検 回数	3 点検 日数	4 点検 箇所	5 点検 箇所	6 点検 箇所	7 点検 箇所	8 点検 箇所	9 点検 箇所	(簡要)
サービス 形態	1 保守 期間	2 スター ター	3 点検 回数	4 点検 箇所	5 点検 箇所	6 点検 箇所	7 点検 箇所	8 点検 箇所	9 点検 箇所	
作業 区分	0 点検 回数	10 点検 回数	11 点検 回数	12 点検 回数	13 点検 回数	14 点検 回数	15 点検 回数	16 点検 回数	17 点検 回数	18 点検 回数
	19 点検 回数	20 点検 回数	21 点検 回数	22 点検 回数	23 点検 回数	24 点検 回数	25 点検 回数	26 点検 回数	27 点検 回数	28 点検 回数

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

ドアバッキング	1		

1	基本・据付 (点検)・性能・	(見積書No.)	2,100
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	1名× 100 円 × 64km	6,400
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	材料道路		1,680

千葉SC 実地者 小泉

責任技術者	検印	人力	材料費

取扱業者 (請求先)

(株)IH177テック

(支店名)

(担当名)

尾関 健

(注文No.)

管理No. 822525

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒357-0013 千葉県千葉市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒356-0032 千葉県上田市佐田280-8
TEL 0268-27-2203 FAX 0268-27-2750

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒357-0013 千葉県千葉市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 会 内 訳

品 A

A 部品代 0

品 B

技術料等 29,080

品 C

品 D

税別合計額 29,080

B

消費税 2,908

ご請求金額 ¥ 31,988

納品書 No.

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

モリタ用

お客様 お名様	名称	製造番号	点検実施日	承認印	
	住所	運転時間	点検実施者		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減菌弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンパーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・变色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)		数量
ドアパッキン		1



株式会社IHI

機械事業本部営業部 営業サービス課

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺2-10-6

TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030