

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 28年 12月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100099	
作業年月日	平成 28 年 12 月 22 日	作業時間： 1.5 Hr	
顧客名	きたむらクリニック 様	TEL： 055-220-4112	
所在地	中央市若宮23番地2	ご担当 様	
販売店	マコト医科精機株式会社	ご担当 浅井 様	
納入年月日	平成 22 年 10 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/27 殺菌時給水異常 (E202)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 662
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ → 交換
給水フィルター	☐	排水フィルター	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常が再発。酸素ポンプの圧力が低く、通電。予備ポンプに交換して
ください。

装置 情報	交換後運転回数： 453	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 87	殺菌/消毒+7L： 1684
	リークチェック： 8	自己洗浄： 813	アルコール単独： 11	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	バリス7-RUSHINGキョウ		☒	各1
オゾンセンサー		☒	/	マニホールド周辺チューブ		☒	1式

お客様ご確認署名欄

28 年 12 月 22 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

萩原

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 H28.12.22 青木順	作業者 H28.12.22 青木順
---------------------------	-------------------------