

点検・修理報告書

管理 No. 19206
発行日: 2020年 3月 5日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 1 月 30 日	作業時間:	8 Hr
顧客名	こみね歯科 様	TEL:	
所在地	千葉県千葉市中央区汐見丘町9-17	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 2 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13090012	運転回数: 2963
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 槽内温度低下		
原因		
・想定原因はコントロール基盤ホコリによる誤作動 ・測温抵抗体の断線		
処置、作業内容		
・基板交換 ・機械室内清掃	ホコリに洗剤が付き温度センサーが誤作動していました掃除をして運転しましたが改善されなく	
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	コントロール基盤		1		
2	測温抵抗体		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 25 日

ご署名 119" 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		