

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 28 年 12 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300084
作業年月日	平成 28 年 12 月 21 日	作業時間： / Hr
顧客名	諏訪形クリニック 様	TEL： 0268-25-5556
所在地	上田市諏訪形 888 番地	ご担当 様
販売店	株式会社 スケン	ご担当 平田 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴		Ver. 0204 / T02BV	
7/28 オゾン水生成装置 (E110)			
8/20 " (E110)			
12/5、12/9 清掃時給水異常 (E202)			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 423
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
給水フィルター	☐	排水フィルター	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。★日常のお手入れに、ご協力いただいております。引き続きお力添えをお願いいたします。			

装置情報	交換後運転回数： 205	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+アル： 684
	リークチェック： 0	自己洗浄： 378	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	バルブ		☒	1
オゾンセンサ		☒	1	マニホールド		☒	1

お客様ご確認署名欄	28 年 12 月 21 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 平田 様
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.12.21 青木順	H28.12.21 青木順