

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業用
IHIアグリテック

名前 お客様 住所	派遣番号 連絡箇所	点検実施日 点検実施者	モリタ担当部署	承認印
ベルダム選科クリニック	13090011 391	2019.12.16 小泉	モリタ担当部署	原

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- チンショーンスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・緩ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の緩手の損傷、漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 減圧弁の取り付け状態・漏れ
- 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槻内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ペアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・漏れ

電気系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター接続確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(印字)
- SDカードの書き込み確認

外装・設置

- 本体の水平確認・基準横き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOS)

運転確認	
<input checked="" type="radio"/>	否

*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は①を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン L=500	1
〃 L=1500	1
HEPA フィルター	1
入口フィルター	1
PP1チューブ	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県倉敷市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030