

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

12-01837

No. 170209

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	彦坂医院 様	機番	100542
環営	所在地	長野県長野市大字鶴賀七瀬中町176-1	納入日	平成24年7月12日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日
				平成29年1月12日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成29年2月6日
3				

修理依頼・不具合内容

・水漏れ

運転回数・・殺菌；1551、殺菌＋アルコール；2、リークチェック；0、自己洗浄；613


不具合原因（故障箇所）と処置

この度は水漏れを発生させてしまい、大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします

〔1〕点検および作業内容

機械内部のオゾン水が通るホースが硬化し、そこから水漏れしていました（写真）
このホースと周辺のチューブを交換して復旧しました。
経年劣化と思われますが、より耐久性のあるホースを検討、選定してまいります。

写真：水漏れ箇所

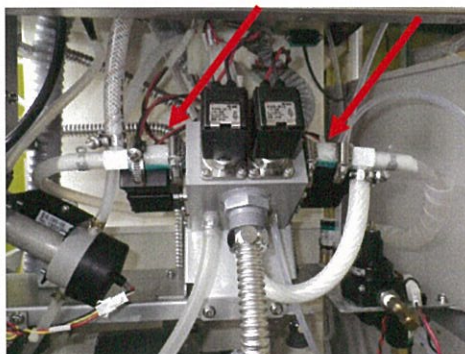

〔2〕作業内容

1：部品交換・・下表をご参照ください

〔3〕性能確認

1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71 ppm・・正常
2：運転確認・・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	マニホールド周辺ホース	5本	

承認



審査



作成

H29.2.9

中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528