

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

12-01385

No. 151019

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 長野支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0
客先	1	顧 客 名	中村内科小児科医院 様			機 番	1 0 0 6 1 3
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	長野県松本市出川町 1 9 番 5			納 入 日	平成 25 年 3 月 1 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成 27 年 10 月 7 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 27 年 10 月 15 日
計	3						

修理依頼・不具合内容

10/7 原水汚れ異常（E:209）5回発生して運転できない

※修理代替機も「原水汚れ異常」が発生した

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕原水汚れ異常につきまして

オゾン水濃度計に流入する水に気泡や懸濁物が多く含まれると、濃度信号が乱れる傾向があります。この濃度信号が規定より外れると「異常」と判断して停止します。

工場で運転確認や内部点検しましたが、異常はありませんでした。
修理代替機も同じ症状が出ることから、現地の水質が不安定な状態にあると推察し
運転プログラムの設定値を変更しました。
これで様子を見てくださいますよう お願いいたします。

なお、お客様が機械をお使い頂くうえでの変更はございません。

〔2〕修理・点検内容

- 1：運転確認・・・「原水汚れ異常」は再現しませんでした
- 2：オゾン水濃度計点検・・・異常ありませんでした（濃度信号パルス 424）
- 3：運転プログラム設定値変更・・・Ver0107⇒Ver0107 改
- 4：装置情報

交換後運転回数：28 殺菌：5、殺菌＋アルコール：100、リークチェック：99

自己洗浄：96、アルコール単独：0、エア単独：0

—以上—

承認



審査



作成

H27. 10. 19

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	アルコールタンクキャップ	1 個	強度 UP 品

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528