

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29年 5月 22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300028
作業年月日	平成 29 年 5 月 22 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	小林病院 様		TEL： 026-226-7880
所在地	長野市南千歳一丁目14番2		ご担当 様
販売店	有限会社 ヤマダ		ご担当 横谷 様
納入年月日	平成 25 年 5 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/12, 5/18 オゾン水生成異常 2 (E115)
5/20, 排水注意 (E111) x 2

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施
給水フィルター・排水フィルター交換 (貴院在庫分より交換)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 430
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
給水フィルター	☒	排水フィルター	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。
ボンバ残在庫が少なく、適宜ボンバ交換をお願いします。

装置情報	交換後運転回数： 969	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 4106	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 4	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	給水フィルターのみ		☒	/
オゾンセンサー		☒	/	排水フィルターのみ		☒	/

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 5月 22日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H29.5.22 	H29.5.22