

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 170720

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	なかじまクリニック 様		機番	300396
環営	所在地	山梨県北杜市長坂町夏秋945-1		納入日	平成26年11月10日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成29年6月19日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成29年7月17日
計	3				

修理依頼・不具合内容

- ・運転終了後に水槽に水が残っている
- ・排水ドレンに白い浮遊物がある

不具合原因（故障箇所）と処置



[1] 点検および作業内容

残水量を確認しましたが、300cc以下で特に問題はありませんでした。
排水配管の取り回しを調整しましたので、様子を見てくださいますようお願いいたします。

- ・「残水」につきまして
フタ、水槽、ポンプ、給水配管、排水管、オーバーフロー管の水滴が集合したものです。
残水量が300ccになると写真2のように排水栓の周囲に水たまりが発生します。
- ・「浮遊物」につきまして
排水配管に溜まった水垢と思われますので清掃いたしました。

写真1：残水200cc

写真2：残水300cc

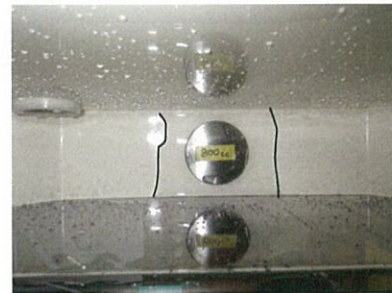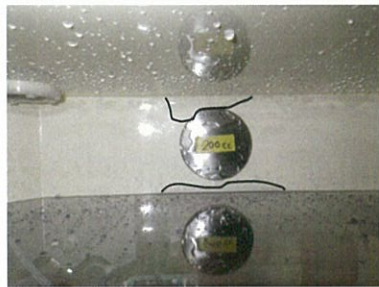

[2] 作業内容

- 1：排水系統分解点検、清掃
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

承認



審査



作成

H29. 7. 20
中澤

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528