

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100542
作業年月日	平成 29 年 7 月 11 日		作業時間： / Hr
顧客名	彦坂医院 様		TEL： 026-226-6930
所在地	長野市大字鶴賀七瀬中町176-1		ご担当 様
販売店	鍋林株式会社		ご担当 腰原 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴 特になし	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 814
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒ ※左に付近セ	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
給水フィルタ ☐	排水フィルタ ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 244	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1682	殺菌/消毒+7L： 3
	リークチェック： 0	自己洗浄： 670	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	29 年 7 月 11 日 長野市七瀬中町176 医療法人 彦坂医院 医師 彦坂吉興 ご署名 電話 226-6930番
--	---

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 H29.7.11	作業者 H29.7.11
-------------------	-----------------