

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29年 9月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300624
作業年月日	平成 29 年 9 月 19 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	市川メディカルクリニック 様	TEL： 055-272-3337
所在地	山梨県西代郡市川三郷町高田518-1	ご担当 様
販売店	マコト医科精機株式会社	ご担当 福岡 様
納入年月日	平成 27 年 8 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
3/31オーバーフロー異常 (E205) 8/30 ホゾ水生成注意 (E110) レベルセンサー異常 (E214)	
4/22 同左	
不具合原因、作業内容	
定期保守メンテナンス実施、内視鏡洗浄は内注のマニュアルのお願い案内。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 416
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。	

装置 情報	交換後運転回数： 230	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 45	殺菌/消毒+7L： 188
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
ポンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	29 年 9 月 19 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	市川メディカルクリニック
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 院長 尾 藤 様

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H29.9.19 青木	H29.9.19 青木