

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29年 9月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300635
作業年月日	平成 29 年 9 月 20 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	しろぎ内科クリニック 様		TEL： 0265-98-5030
所在地	上伊那郡箕輪町中箕輪8603		ご担当 様
販売店	株式会社マテリアル 伊那支店		ご担当 小林 様
納入年月日	平成 27 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
8/25 排水異常 (E402)	
不具合原因、作業内容	
定期保守作業実施、内視鏡洗浄：内視鏡の洗浄のお手伝い、OED専用チューブ 4種類の品 (E-100S, E-101, E-102, E-104)	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 504
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒ → 交換
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐ → 交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。	

装置 情報	交換後運転回数： 1163	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 702	殺菌/消毒+アル： 1498
	リークチェック： 1471	自己洗浄： 466	アルコール単独： 24	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1式
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 29 年 9 月 20 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	しろぎ内科クリニック
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 院長 城崎 輝之

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 H29.9.20	作業者 H29.9.20
-------------------	-----------------