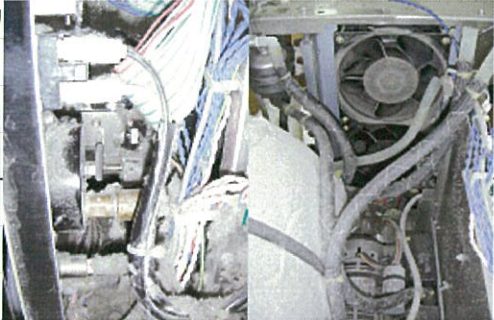


点検・修理報告書

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 4 月 6 日		作業時間： Hr
顧客名	みつわ台総合病院 様		TEL：
所在地	千葉県千葉市若葉区若松町531-486		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100060	運転回数： 3207
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ドア開閉不良 ・エラー30 缶体真空異常		
原因	・機体内に埃が堆積しドアのリミットスイッチが誤作動 ・真空ポンプの老朽化によるエラー30の発生	
処置、作業内容	  ・真空ポンプ交換 ・機体内埃除去 ・給水タンク・排水タンク・水ポンプフィルター清掃 ・定期メンテナンス実施、各種点検調整、運転確認	
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 5 月 28 日

ご署名 近藤 太一 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

