

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29 年 10 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300962
作業年月日	平成 29 年 10 月 19 日	作業時間： 2 Hr
顧客名	あおぞらクリニック 様	TEL： 0268-75-1100
所在地	長野県上田市上田原1331	ご担当 様
販売店	中日本テクノ株式会社 佐久営業所	ご担当 沼田 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 6 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施
(内視鏡洗浄に関する点検のお預り)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 538
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません 酸素ポンプの残量も少なくなっています。適宜交換をお願いします。

装置 情報	交換後運転回数： 282	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 64	殺菌/消毒+7L： 220
	リークチェック： 281	自己洗浄： 0	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1セット
排水栓		☒	1	接続コネクタ、水槽側		☐	
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ、チューブ側		☐	
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
ポンプセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H29 年 10 月 19 日

ご署名 清水 俊明 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 H29.10.19 青木	作業者 H29.10.19 山崎
--------------------------	------------------------