

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100304
作業年月日	平成 29 年 10 月 26 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	丸谷医院 様		TEL： 0269-26-0077
所在地	中野市大字片塩465-1		ご担当 様
販売店	有限会社 長野医科器械		ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 23 年 10 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
1/6. 8/9. 8/26 酸素圧力異常2(E200)	
不具合原因、作業内容	
定期保守作業実施, 内視鏡洗浄に付するアートの交換に案内	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 529
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ → 交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。	

装置 情報	交換後運転回数： 93	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 20	殺菌/消毒+7L： 694
	リークチェック： 1	自己洗浄： 212	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☐	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☐	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1本
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄	29.10.月26日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	理事長 丸谷和洋
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 E L (0269) 2-6-0077 号

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H29.10.26 青木	H29.10.26 青木