

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29年 11月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300343
作業年月日	平成 29 年 11 月 9 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	小川村国民健康保険直営診療所 様		TEL： 026-269-2279
所在地	長野県上水内郡小川村大字高府13467		ご担当 様
販売店	株式会社 スケン		ご担当 平田 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/19 オゾン水生成異常 (E110)
 オゾン水生成異常 (E207)
 9/29 濃度維持異常 (E302)

不具合原因、作業内容

定期保守作業実施、内視鏡洗浄に付するマフラーのお取り扱い案内

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 432
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	給水フィルター	交換 ☒ 交換済

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常が有せん。給水フィルター交換致しました。

装置 情報	交換後運転回数： 149	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 65	殺菌/消毒+アル： 344
	リークチェック： 18	自己洗浄： 170	アルコール単独： 1	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 11 月 9 日
 小川村国民健康保険直営診療所

ご署名

伊藤 晴美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

責任技術者 H29.11.9 青木	作業者 H29.11.9 青木
-------------------------	-----------------------