

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300391
作業年月日	平成 29 年 11 月 16 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	滝沢内科医院 様	TEL： 026-215-2888
所在地	長野県須坂市臥竜6-12-20	ご担当 様
販売店	株式会社 千曲医療器	ご担当 小林 様
納入年月日	平成 26 年 11 月 11 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし

不具合原因、作業内容

定期保守点検

内視鏡洗浄に関するアンケートのお返しい

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 380
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	アルコール消毒液キャップ	☒ 交換 (青)

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありません

装置情報	交換後運転回数： 91	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+アル： 300
	リークチェック： 1	自己洗浄： 291	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ、チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	アルコール消毒液キャップ (青)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

29 年 11 月 16 日

滝沢芳夫

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者

H29.11.16

青木

作業者

H29.11.16

山崎