

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29年 9月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300058
作業年月日	平成 29 年 9 月 7 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	稲里生協クリニック 様		TEL： 026-286-1500
所在地	長野市稲里町2-17-8		ご担当 安藤 様
販売店	中日本行 ｲｵﾘﾝｸﾞ株式会社 長野事業所		ご担当 小林輝 様
納入年月日	平成 25 年 8 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/26 消毒時給水異常 (E202)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施。排水フィルタ清掃、マニホールド周辺を交換
内視鏡洗浄に關するアンケートのお願い案内。

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 586
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☐ 交換
給水フィルタ	日		排水フィルタ		☒ 清掃

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。作業開始前の排水時間 1分35秒。フィルタ清掃後 1分30秒
※漏水テストと内視鏡を接続する金具のガセ清掃を控えて下さい。ご協力お願い申し上げます。

装置情報	交換後運転回数： 589	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1584	殺菌/消毒+7L： 872
	リークチェック： 2438	自己洗浄： 880	7L単独： 7	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1 set
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2017 年 9 月 7 日

ご署名 安藤 恵子 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H29.9.7 青木	H29.9.7 青木