

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	しはた矯正歯科クリニック様	製造番号	300071	ご確認	紫田 建司
	住所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷	納入検査実施日	2020.9.18		
		2-2-5 アットホームセンタービル2F	納入検査実施者	IHIアグリテック 佐原		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ	外装・設置	✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	性能評価	✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	B&Dテスト実施
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	その他	✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項

BMS-Test STEAM

安全説明確認カード

下記の販売説明員から装置の安全な取り扱いと操作及び保証書の内容について、説明を聞きました。

●説 明 日	2020 年 9 月 18 日
●お客様ご住所	〒260-0003 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-2-5 アットホームセンタービル2F
●お電話番号	☎ 043(274) 3339
フリガナ ●お客様のお名前 (署名)	ササキ マサシ 笹田 健司

●販売店住所	〒260-0003 千葉市稲毛区園生町 956-4
●販売店名	ササキ(株) 千葉支店 ☎ 043(287) 8241

●納入説明者氏名	(株)IHエアグリテック 小笠原健
----------	-------------------

●ご購入商品と
製造番号

形式名	製造番号
Ieclave	300071

備 考

①メーカー控え
(説明者→(株)IHエアグリテック)