

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成 29年 10月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300671
作業年月日	平成 29 年 10 月 24 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	ももせクリニック 様		TEL： 0263-77-1188
所在地	長野県安曇野市三郷温 2 6 4 5 - 3		ご担当 様
販売店	鍋林株式会社		ご担当 上條 様
納入年月日	平成 27 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
11/7 排水異常 2 (E402)			
8/31 酸素圧力異常 (E200)			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検 作業 , 内視鏡洗浄に因るマシンのお断り案内			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 306
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません			

装置情報	交換後運転回数： 88	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 4	殺菌/消毒+アル： 84
	リークチェック： 0	自己洗浄： 77	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	〒399-8102 長野県安曇野市三郷温 2645-3
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	医療法人桂心庵 ももせクリニック
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 百瀬佳代子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

TEL 0263-77-1188	責任技術者 作業者
H29.10.24	H29.10.24
青木	青木