

保守点検・修理 報告書

販売名: オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 [x] オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S []
作業年月日: 平成 29 年 10 月 27 日
製造番号: 100560
作業時間: 2 Hr
顧客名: 東御市立みまき温泉診療所 様
所在地: 長野県東御市布下6-1
ご担当: 様
販売店: 株式会社 マテリアル 上田支店
ご担当: 島田 様
納入年月日: 平成 24 年 9 月 26 日
保証期間: 内 [] 外 [x]
付属品:
作業区分: 保守点検 [x] 総合点検 [] 年 回目
定期点検シール記入 [x]
出張・引取: 修理 [] 点検のみ [] その他 []
修理表示貼付 []

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常履歴 特におりません
不具合原因、作業内容
定期保守 作業実施
内視鏡洗浄に関するアンケートのお願い
点検項目
フタロック 正常 [x]
酸素ライン 正常 [x]
アルコールライン 正常 [x]
オゾンセンサ 正常 [x]
給水ライン 正常 [x]
濃度計流量 正常 [x]
水位センサー 正常 [x]
水漏れ確認 正常 [x]
清掃 正常 [x] 清掃 [x]
トレイ 正常 [x]
殺菌槽コネクタ 正常 [x]
殺菌槽 LED 正常 [x]
エアライン 正常 [x]
オゾン水濃度計動作 正常 [x]
排水栓、排水ライン 正常 [x]
細管送水ライン 正常 [x]
排気ライン 正常 [x]
オゾン濃度 正常 [x] 履歴 0.72 ppm
異常音、振動 正常 [x]
電源コード 正常 [x]
殺菌チューブ類 正常 [x]
マニホールド周辺チューブ 正常 [x]
バルブ数 344
交換部品の交換
交換後運転回数: 18
更新(リセット) 実施 [x] 未実施 []
殺菌/消毒: 5
殺菌/消毒+7L: 140
リークチェック: 139
自己洗浄: 102
7L単独: 0
エア単独: 0
交換部品名称 部品コード 交換 数量
オゾン分解触媒 [x] 1
排水栓 [x] 1
オゾン水濃度計 [x] 1
オゾン水濃度計用フィルタ [x] 1
オゾンセンサー [x] 1
吸盤 [x] 1
接続コネクタ、水槽側 []
接続コネクタ、チューブ側 []
マニホールド周辺チューブ [x] 1式
お客様ご確認署名欄
内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
ご署名 奥泉 宏康
責任技術者 青木
作業者 山崎

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840
責任技術者 青木
作業者 山崎
Ver.3.1