

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 3月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300807
作業年月日	平成 30 年 3 月 29 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	労働衛生協会 ほたるの里健診センター様		TEL： 0266-41-3018
所在地	長野県上伊那郡辰野町辰野 1477-6		ご担当 松尾 様
販売店	サマックス株式会社		ご担当 中村 様
納入年月日	平成 28 年 3 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

10/15 酸素圧力異常 2 (E200)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施、内視鏡洗浄に関するアンケートのお問い合わせ

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 7/2
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。 ※給水フィルター、排水フィルター交換済み（有償）
 ※毎年交換をおすすめします。ご検討ください。

装置情報	交換後運転回数： 33/	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 504	殺菌/消毒+アル： 3
	リークチェック： 267	自己洗浄： 146	アルコール単独： 263	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルター（活性炭仕様）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルター（活性炭仕様）		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

アルコール消毒液（有）

H30年 3月 29日

ご署名 松尾 睦美



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

責任技術者

H30.3.29



作業者

H30.3.29

