

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30年 1月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300198
作業年月日	平成 30 年 1 月 15 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	片桐内科クリニック 様		TEL： 026-215-1900
所在地	長野県長野市上松4-33-7		ご担当 様
販売店	鍋林株式会社		ご担当 腰原 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
5/13. 酸素ライン異常 (E200)			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施、内視鏡洗浄に際してマーケットのお腹いす内			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 487
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。			

装置情報	交換後運転回数： 309	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 481	殺菌/消毒+アル： 931
	リークチェック： 0	自己洗浄： 2	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2018 年 1 月 15 日 〒380-0802 長野県長野市上松4-33-7 片桐内科クリニック ご署名 理事長 片桐 昌 尋 印
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 H30.1.15 青木	作業者 H30.1.15 青木
-------------------------	-----------------------