

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 6月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100787
作業年月日	平成 30 年 6 月 21 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	宮坂医院 様		TEL： 0266-52-1711
所在地	長野県諏訪市元町4-10		ご担当 新海 様
販売店	株式会社 マテリア 松本支店		ご担当 笠原 様
納入年月日	平成 25 年 6 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/8 酸素圧異常2 (E200)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施、内視鏡洗浄に因るバルブの故障の要あり

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 640
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ ※ホースより水漏れ確認	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※左にピン付の電線	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機械動作に異常ありません。ホース接続口（蛇口側）からの水漏れを確認しました。
→対応については6/25日にご連絡致します。

装置情報	交換後運転回数： 119	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 50	殺菌/消毒+アル： 647
	リークチェック： 3	自己洗浄： 19	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（青）		☒	1
ポンプセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1式

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

長野県諏訪市元町4番10号

医療法人 清風会

宮坂医院

ご署名 宮坂圭 一印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H30.6.21 青木	H30.6.21 青木