

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年 3月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300524
作業年月日	平成30年 3月 28日		作業時間： 1 Hr
顧客名	ことぶき診療所 様		TEL：0555-22-9011
所在地	山梨県富士吉田市上暮地5丁目8番16		ご担当 様
販売店	豊前医化株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成27年 3月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴あり

不具合原因、作業内容

保守点検作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 288
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコールキャップ交換済、殺菌槽内洗浄済、排水栓・排水ライン・細管送水ライン・排気ライン・オゾン濃度計・水位センサー・水漏れ確認・清掃・異常音・振動・電源コード・殺菌チューブ類・マニホールド周辺チューブ

装置 情報	交換後運転回数：169	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒：85	殺菌/消毒+アル：415
	リークチェック：2	自己洗浄：32	アルコール単独：0	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
ポン水濃度計		☒	1			☐	
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

平成30年 3月 28日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 田邊 好英



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者

作業者

