

点検・修理報告書

管理 No. 20xxx

発行日: 2021/2/18

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2021年2月17日		作業時間: 8 Hr
顧客名	須田外科・歯科医院 様		TEL: 0475-23-7748
所在地	千葉県茂原市高師2208-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 5 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100330	運転回数: 1475回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・乾燥ファンが故障している。

原因

・修理時の運転確認では正常に作動しておりましたが、ファンに腐食があり、設置運転時に故障していたのだと考えられます。
ファンを取り外し確認したところ、腐食が進んでおりました。

処置、作業内容

・乾燥ファンを交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥ファン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認事項欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 5 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
21/2/18	21/2/18	21/2/18

点検・修理報告書

管理 No. 20684

発行日: 2021/2/8

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年2月8日			作業時間:	8 Hr
顧客名	須田外科・歯科医院 様			TEL:	0475-23-7748
所在地	千葉県茂原市高師2208-3			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2018 年 5 月 14 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			
装置情報	製造番号:	100330	運転回数:	1475回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー1: 漏洩検知エラーの発生					
・画面がロゴから先に動かない					
原因					
・乾燥エアー配管の継手が割れており、漏水しておりました。					
・漏水によりDC24V電源がショートし、制御基板への電源供給が遮断されたため制御できなくなっておりました。					
・画面はDC5V電源により駆動しているためロゴは表示されますが、電源ショートにより画面が切り替わりませんでした。					
処置、作業内容					
・水漏れ箇所の修繕 (PPS継手の交換等)					
・DC24V電源、漏洩センサーAssyの交換					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	DC24V電源		1	¥22,100	¥22,100
2	漏洩センサーAssy		1	¥14,000	¥14,000
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		¥36,100
			技術料		¥30,000
			出張料		¥11,620
			合計		¥77,720
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 3 月 3 日		
			ご署名 須田 印		

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
21/02/08	21/02/08	21/02/08