

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年 5月 21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300028
作業年月日	平成30年 5月 21日		作業時間： 1 Hr
顧客名	小林病院 様		TEL：026-226-7880
所在地	長野県長野市南千歳1丁目14番地2		ご担当 様
販売店	ヤヨイメディカル		ご担当 様
納入年月日	平成25年 5月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 50/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	清掃 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコールキャブ(本)交換済
トレイ左上ヒビあり

装置情報	交換後運転回数：1055 更新(リセット) 実施 ・未実施	殺菌/消毒：5161	殺菌/消毒+7L：○
	リークチェック：○	自己洗浄： ☒	アルコール単独：○
		エア単独：○	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	給水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	排水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周ホース		☒	5
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成30年 5月 21日
〒380-0823 長野県長野市南千歳1-14-2

医療法人 淳和会

小林病院

TEL 026-226-7880

責任技術者 6657 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840