

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 5月 24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300295	
作業年月日	平成 30 年 5 月 24日	作業時間： 1.5 Hr	
顧客名	市川医院 様	TEL： 0267-25-1200	
所在地	長野県小諸市市町5丁目3番8号	ご担当 様	
販売店	株式会社 千曲医療器	ご担当 丸山 様	
納入年月日	平成 26 年 5 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/25, 6/6 消毒時給水異常 (E202)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施, 内視鏡洗浄に関するアンケートのお願い等

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 587
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。使用後のお手入れを丁寧に実施いただきありがとうございます。
引き続きお力添えをお願いします。

装置情報	交換後運転回数： 573	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 854	殺菌/消毒+アル： 1647
	リークチェック： 3	自己洗浄： 523	アルコール単独： 16	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	アルミバルブキャップ(青)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	脱臭フィルター(フタ)		☒	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年 5月 24日

市川 卓郎

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者

H30.5.24



作業者

H30.5.24

