

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 10月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300083
作業年月日	平成 30 年 10 月 17 日	作業時間： 2 Hr
顧客名	山口内科医院 様	TEL： 026-246-1211
所在地	長野県須坂市墨坂南3丁目7番23号	ご担当 様
販売店	有限会社 長野医科器械	ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	付属品
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/30 消毒時給水異常 (E202)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 384
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 6.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません

装置情報	交換後運転回数： 296	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 40	殺菌/消毒+アル： 1353
	リークチェック： 0	自己洗浄： 5	アルコール単独： 4	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（青）		☒	1
ポンプセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1式

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30 年 10 月 17 日
〒382-0098 長野県須坂市墨坂南3-7-23
医療法人 山口内科医院
ご署名 山口 貴之 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H30.10.17 青木	H30.10.17 青木