

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 8月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301224
作業年月日	平成 30 年 8 月 2 日	作業時間： / Hr
顧客名	鳥羽医院 様	TEL： 0263-66-2435
所在地	長野県東筑摩郡筑北村坂北4525-1	ご担当 様
販売店	株式会社 IM・I-	ご担当 川上 様
納入年月日	平成 29 年 8 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常履歴なし	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施、内視鏡洗浄=内視鏡マフラーのお願い要あり。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 336
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。	

装置 情報	交換後運転回数： 39	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+アル： 38
	リークチェック： 0	自己洗浄： 41	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（青）		☐	
ポンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30年 8月 2日
長野県東筑摩郡筑北村坂北4525-1

鳥羽医院

ご署名 鳥羽 龍二

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H30.8.2 青木	H30.8.2 青木