

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 9月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300635
作業年月日	平成 30 年 9 月 19 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	しろぎ内科クリニック 様		TEL： 0265-98-5030
所在地	長野県上伊那郡箕輪町中箕輪8603		ご担当 様
販売店	株式会社 マテリア 伊那支店		ご担当 小林 様
納入年月日	平成 27 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/19. 消毒時給排水異常 (E202)
8/3 " (E202)

不具合原因、作業内容

定期保守作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 506
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 必交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置情報	交換後運転回数： 1340	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 1252	殺菌/消毒+7L： 2288
	リークチェック： 2248	自己洗浄： 699	アルコール単独： 31	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（青）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1式

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 30. 9. 19 日

しろぎ内科クリニック

ご署名 院長 城崎 輝之

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H30.9.19 青木	H30.9.19 青木