

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 31 2月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300478	
作業年月日	平成 31 年 2 月 15 日	作業時間： 1.5 Hr	
顧客名	ついじ内科消化器科クリニック 様	TEL： 0268-29-8686	
所在地	長野県上田市築地 539-2	ご担当 様	
販売店	有限会社 長野医科器械	ご担当 藤原 様	
納入年月日	平成 27 年 2 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/5 消毒時給水量異常, 7/17 濃度維持異常, 8/31, 9/6. オゾン水生成注意
10/30 濃度維持異常

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ (注) X-7-裏側 X77 栓欠損	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 502
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機械本体動作、異常ありません。(注) 酸素ホバに付いている減圧弁 X-7-裏側の X77 栓が、破壊していました。対応については後日、ご案内致します。

装置情報	交換後運転回数： 149	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 95	殺菌/消毒+アル： 718
	リークチェック： 0	自己洗浄： 618	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H. 31 年 2 月 15 日

ご署名

飯島義浩



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H31.2.15 	H31.2.15