

管理 No.

## 保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 9月 26 日

|       |                                                                                                       |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> | 製造番号： 100560                                                          |
| 作業年月日 | 平成 30 年 9 月 26 日                                                                                      | 作業時間： 1.5 Hr                                                          |
| 顧客名   | 東御市立みまき温泉診療所 様                                                                                        | TEL： 0268-61-6002                                                     |
| 所在地   | 長野県東御市布下6-1                                                                                           | ご担当 様                                                                 |
| 販売店   | 株式会社 マテリアル 上田支店                                                                                       | ご担当 島田 様                                                              |
| 納入年月日 | 平成 24 年 9 月 26 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                  |                                                           |
| 異常履歴なし                                                                           |                                                           |
| 不具合原因、作業内容                                                                       |                                                           |
| 保守点検作業                                                                           |                                                           |
| 点検項目                                                                             |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                  | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 654 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                   | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                                        |                                                           |
| 異常ありません                                                                          |                                                           |

|          |              |                                                    |            |               |
|----------|--------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 12  | 更新（リセット）実施・未実施 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 5   | 殺菌/消毒+アル： 152 |
|          | リークチェック： 152 | 自己洗浄： 112                                          | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称          | 部品コード | 交換                                  | 数量   |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------------|-------|-------------------------------------|------|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤              |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1set |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールタンクキャップ（青） |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                 |       | <input type="checkbox"/>            |      |

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 30年 9月 26日                                                                            |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |                                                                                       |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |                                                                                       |
| ご署名 奥泉宏康                          |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL：0263-24-2840

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                          | 作業者                                                                                            |
| H30.9.26  | H30.9.26  |