

保守点検・修理 報告書

発行日： 2019 年 4 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300079
作業年月日	2019 年 4 月 18 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	芦沢胃腸科外科 様		TEL： 026-222-2000
所在地	長野市大豆島542-1		ご担当 様
販売店	協和医科器械株式会社		ご担当 鴨井 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
2/2 オゾン水生成異常 2 (E215)			
4/10. オーバーフロー異常 (E205)			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 613
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※トレイ右下ヒビあり	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ ※交換
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
※トレイ右下から中心に向いヒビが発生しています。ご使用の際は怪我をされる様注意してご使用ください。安全の為、トレイの更新も検討ください。機械動作に異常ありません。			

装置情報	交換後運転回数： 840	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1516	殺菌/消毒+7L： 2060
	リークチェック： 1	自己洗浄： 1475	7Lアルコール単独： 5	エア単独： 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1set
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		31 年 4 月 18 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		医療法人 芦沢胃腸科外科
ご署名		芦沢 賢一

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.4.18 青木	2019.4.18 青木