

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

12-02428

No. 181106

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	芦沢胃腸科外科 様		機番	300079
環営	所在地	長野県長野市大豆島 5 4 2 - 1		納入日	平成 25 年 10 月 22 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 30 年 7 月 18 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 30 年 10 月 18 日

修理依頼・不具合内容


7/12 オゾン水生成異常 5 回発生
排水ポンプ付近から異音がする

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転確認したところ、異常が再現しました。
オゾン水を製造するポンプの回転部分が劣化しており、これが異常と異音の原因でした。
このポンプと基板を交換して復旧いたしました。
なお、エアポンプと排水ポンプは異常ありませんでした。

No. 1～3：メインポンプ、パッキン

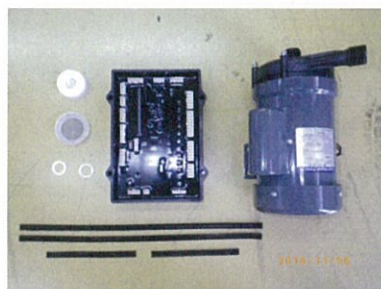

No. 4：タッチパネル



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換、分解清掃・・・写真と下表をご参照ください
- 2：運転確認・・・正常
- 3：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 4：出荷時の装置情報

交換後運転回数：1400 殺菌：1841、殺菌＋アルコール：1259、リークチェック：1
自己洗浄：1343、アルコール単独：4、エア単独：4

承認



審査



作成

H30. 11. 6
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	配管チューブ、パッキン	1 式	アルコールノックアップ 含む
2	メインポンプ	1 台	
3	コントロール基板	1 枚	調査のため
4	タッチパネル	1 台	

（株）IHI アグリテック （旧社名 IHI 水ウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528