

## 保守点検・修理 報告書

|       |                                                                                                       |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> | 製造番号： 300391                                                          |
| 作業年月日 | 平成 30 年 11 月 12 日                                                                                     | 作業時間： 〇 〇 Hr                                                          |
| 顧客名   | 滝澤内科医院 様                                                                                              | TEL： 026-215-2888                                                     |
| 所在地   | 長野県須坂市臥竜6-12-20                                                                                       | ご担当 様                                                                 |
| 販売店   | 株式会社 千曲医療器                                                                                            | ご担当 丸山 様                                                              |
| 納入年月日 | 平成 26 年 11 月 11 日                                                                                     | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施、※給水ホース接続部水漏れ対応。

点検項目

|          |    |                                                                            |              |    |                                                 |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 388    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input type="checkbox"/> ※                                                 | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input type="checkbox"/> ※                                                 | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                                   |              |    | <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機械動作に異常ありません。洗濯機用ニッパルの水漏れを確認し部品交換致しました。

|      |             |                |            |               |
|------|-------------|----------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 80 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒： 3   | 殺菌/消毒+アル： 379 |
|      | リークチェック： 1  | 自己洗浄： 369      | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称          | 部品コード | 交換                                  | 数量   |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------------|-------|-------------------------------------|------|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤              |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1set |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールタンクキャップ（青） |       | <input type="checkbox"/>            |      |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |                 |       | <input type="checkbox"/>            |      |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30 年 11 月 12 日

ご署名

滝澤 芳夫 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL：0263-24-2840

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 責任技術者           | 作業者             |
| H30.11.12<br>青木 | H30.11.12<br>青木 |