

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 11月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300396
作業年月日	平成 30 年 11 月 16 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	なかじまクリニック 様	TEL： 0551-32-0066
所在地	山梨県北杜市長坂町夏秋945-1	ご担当 様
販売店	有限会社 平穂医科器械	ご担当 川口 様
納入年月日	平成 26 年 11 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/16 排水異常 (E402)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 540
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐ (※電源コンセント側) 被覆剥れ
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機械動作に異常ありません。電源コンセントプラグ側、被覆剥れは、FY 三芯線が
見える状態です。安全のため部品（電源コード）交換を勧めています。

装置情報	交換後運転回数： 164	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 103	殺菌/消毒+アル： 564
	リークチェック： 1	自己洗浄： 568	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（青）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	1942 7.11.19-		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 30 年 11 月 16 日

ご署名

仲島 伸江

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H30.11.16 青木	H30.11.16 青木