

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30年 12月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300417
作業年月日	平成 30 年 12 月 5 日	作業時間： 2 Hr
顧客名	たわら内科クリニック 様	TEL： 055-276-5151
所在地	山梨県甲斐市西八幡1191	ご担当 俵 様
販売店	株式会社 匠マテイル	ご担当 中島 様
納入年月日	平成 26 年 12 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/19 起動時 給水異常 (E201)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 542
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐ *
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 必要換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。専用消毒チューブ E-101 先端のゴムに劣化が見られます（2本）
消耗品となりますので更新ご検討ください

装置情報	交換後運転回数： 731	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 438	殺菌/消毒+アル： 1653
	リークチェック： 1	自己洗浄： 12	アルコール単独： 3	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールカクキヤップ（青）		☐	
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1本

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H30年 12月 5日

署名 俵 章 夫



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H30.12.5 	H30.12.5