

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100263
作業年月日	平成 30 年 12 月 18 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	弦間医院 様		TEL： 0553-47-0510
所在地	山梨県笛吹市一宮町末木864-2		ご担当 弦間 様
販売店	株式会社 匠ディール		ご担当 中島 様
納入年月日	平成 23 年 9 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
1/3, 1/5 殺菌時給水異常 (E202)			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 476
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐ ※左上、右下にヒビ	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
機械動作異常ありません。①トレー 2ヶ所にヒビがあります（左上ヒビ付、右下） ②送水配管（CA-503 S/A）パッキン劣化 ①、②更新検討中			

装置 情報	交換後運転回数： 85	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 593	殺菌/消毒+アル： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 7	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1 set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールタンクキャップ（青）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2018 年 12 月 18 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 弦間 和仁 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H30.12.18 青木 順	H30.12.18 青木 順