

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 7 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号: 100117
作業年月日	2019 年 7 月 19 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	玉井医院 様		TEL: 0263-67-2231
所在地	長野県東筑摩郡麻績村麻4156-1		ご担当 様
販売店	株式会社 マイト 松本支店		ご担当 原 様
納入年月日	平成 22 年 7 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施、減圧弁パッキン交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐ 酸素漏れパッキン交換	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 629
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ 必左上パッキン根元も有	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

酸素ボンベと減圧弁の接続部から酸素漏れも確認しました。減圧弁のパッキンも交換し、酸素漏れは解消されました。交換作業後、試運転も実施し異常ありません。

装置情報	交換後運転回数: 34	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 715	殺菌/消毒+7L: 5
	リークチェック: 3	自己洗浄: 28	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	減圧弁パッキン		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 19 日

ご署名

玉井 万重

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.7.19 青木	2019.7.19 青木