

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 31 1 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300342	
作業年月日	平成 31 年 1 月 29 日	作業時間： 1.5 Hr	
顧客名	日比優一クリニック 様	TEL： 0268-21-0721	
所在地	上田市上田原158-1	ご担当 様	
販売店	岡野薬品株式会社	ご担当 牛丸 様	
納入年月日	平成 26 年 9 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/3, 8/7, 8/8, 8/10, 8/20 オゾン水生成注意 (E110)
8/20, 9/5, 9/10, 9/12 オゾン水生成異常2 (E215)
9/12 原水流れ異常 (E209)

不具合原因、作業内容

保守点検作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 592
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐ ※トレー(左)左, トレー(右)右	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置情報	交換後運転回数： 1432 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2437	殺菌/消毒+7L： 2778
	リークチェック： 2362 自己洗浄： 908	アルコール単独： 15	エア単独： 495

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ、チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1set
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31 年 1 月 29 日

ご署名 日比優一



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H31.1.29 	H31.1.29