

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 7 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300341
作業年月日	2019 年 7 月 5 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	西沢内科胃腸科医院 様		TEL: 026-248-1212
所在地	長野県須坂市墨坂1丁目4番1号		ご担当 様
販売店	株式会社 千曲医療器		ご担当 藤沢 様
納入年月日	平成 26 年 7 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/30 起動時給水異常 (E201)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 560
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 必交換
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。送水金具 (CA-503 SA G5) 着側のバルブが劣化しています。早めに部品交換をお願いします。

装置情報	交換後運転回数: 196	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 6	殺菌/消毒+7L: 1065
	リークチェック: 0	自己洗浄: 468	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1set
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 5 日

須坂市墨坂一丁目4番1号
西沢内科胃腸科医院

西沢 好雄

TEL (026) 248-1212
FAX (026) 248-1271

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

2019.7.5

2019.7.5