

保守点検・修理 報告書

発行日： 2019 年 7 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301196
作業年月日	2019 年 7 月 11 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	波多野医院 様		TEL： 0265-22-0666
所在地	長野県飯田市伝馬町1-46		ご担当 様
販売店	株式会社 マティオ 飯田支店		ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 7 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 629
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。使用後のお手入れも丁寧に実施いただきありがとうございます。
 ※、酸素ポンプの残量が少なかった為、予備ポンプに交換しました。

装置情報	交換後運転回数： 113	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 12	殺菌/消毒+7L： 221
	リークチェック： 161	自己洗浄： 2	アルコール単独： 1	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1 set
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年7月11日
 長野県飯田市伝馬町1-46
 医療法人 秀成会 波多野医院
 医師 波多野剛之
 ご署名 TEL 0265-22-0666

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
2019.7.11	2019.7.11