

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 8 月 29 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号: 300058      |
| 作業年月日 | 2019 年 8 月 29 日                                                                                                           |                                                                       | 作業時間: 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 稲里生協クリニック 様                                                                                                               |                                                                       | TEL: 026-286-1500 |
| 所在地   | 長野県長野市稲里町中央2-17-8                                                                                                         |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 中日本株式会社                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 小林 様          |
| 納入年月日 | 平成 25 年 8 月 29 日                                                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

|          |                          |                                                                            |              |                          |                                                 |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 550    |
| オゾンセンサ   | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/> |                                                                            |              | <input type="checkbox"/> |                                                 |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません

|          |               |                  |              |                |
|----------|---------------|------------------|--------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 599  | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒: 2361  | 殺菌/消毒+7L: 1300 |
|          | リークチェック: 3562 | 自己洗浄: 1309       | 7Lアルコール単独: 8 | エア単独: 2        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量   |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|------|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1set |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |      |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |      |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 8 月 29 日

ご署名 堀入 美有紀



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL: 0263-24-2840

| 責任技術者        | 作業者          |
|--------------|--------------|
| 2019.8.29 青木 | 2019.8.29 青木 |