

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 10 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300083
作業年月日	2019 年 10 月 18 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	山口内科医院 様		TEL: 026-246-1211
所在地	長野県須坂市墨坂南3丁目7番23号		ご担当 様
販売店	有限会社 長野医科器械		ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/23. 光量低下異常 (E210), ラン10切れ異常 (E212)
9/26. 起動時給水異常 (E201)

不具合原因、作業内容

・保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 768
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数: 392	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 45	殺菌/消毒+アル: 1740
	リークチェック: 0	自己洗浄: 5	アルコール単独: 4	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 10 月 18 日
長野県須坂市墨坂南3-7-25

医療法人 山口内科医院

026-246-1211

ご署名 山口 雅彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店

長野県松本市高宮東5-13

TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

2019.10.18

2019.10.18

青木

青木