

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 10 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300671
作業年月日	2019 年 10 月 23 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	ももせクリニック 様		TEL: 0263-77-1188
所在地	長野県安曇野市三郷温2645-3		ご担当 様
販売店	鍋林株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴なし			
不具合原因、作業内容			
・保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 590
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。使用後のお手入れも丁寧に実施いただきありがとうございます。			

装置 情報	交換後運転回数: 87	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 4	殺菌/消毒+アル: 171
	リークチェック: 0	自己洗浄: 162	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ (青)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒399-8102 長野県安曇野市三郷温2645-3
 医療法人社 心療 ももせクリニック
 百瀬 佳代子 印
 ご署名 TEL 0263-77-1188 FAX 0263-77-1188

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者 2019.10.23 青木	作業者 2019.10.23 青木
---------------------------	-------------------------