

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

12-02766

No. 191113

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 長野支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	斉藤医院 様			機番	300416
環営	所在地	山梨県南アルプス市在家塚1189番地			納入日	平成26年12月9日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	令和元年07月17日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	令和元年11月04日
計	3					

修理依頼・不具合内容

排水異常頻発
(通電すると、いきなり排水が始まる現象)


不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下の通りご報告いたします。

〔1〕点検および作業内容

工場で運転確認したところ、不具合が再現しました。
コントロール基板の水を検知する回路の不具合が原因でした。また排水ポンプも性能劣化が見られましたので、交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式

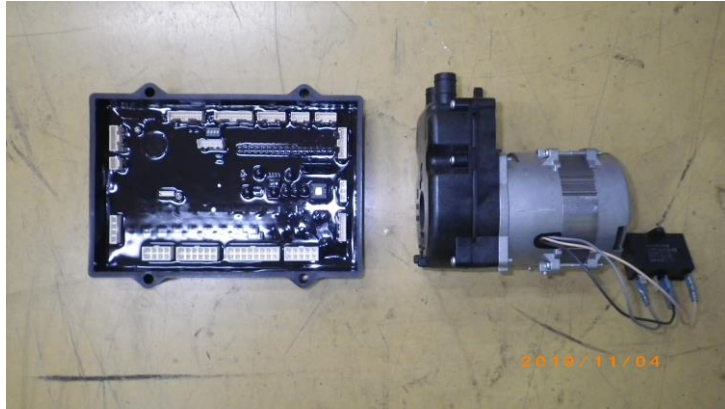

〔2〕作業内容

- 1：水位センサ～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

〔3〕性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

承認

若
19.11.13
井

審査

中
19.11.13
澤

作成

R01.11.13
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水ポンプ	1台	
	コントロール基板	1枚	今回無償

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528