

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 12 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300325
作業年月日	2019 年 12 月 20 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	村の診療所 安部医院 様		TEL: 0269-67-0502
所在地	長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9780-4		ご担当 安部 様
販売店	株式会社 スズケン		ご担当 高林 様
納入年月日	平成 26 年 7 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2018/7/4 ~ 2018/7/27 原水汚染異常(E209)

→ 2018/7/28 IHIアグリティ7 (持) 対策・対応実施。以降異常履歴なし。

不具合原因、作業内容

・保守点検作業実施
・排水ホース清掃

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 >65
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
	☐			☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。排水ホース内の清掃を実施。酸素の残量が少なかった為予備ポンプ交換
ご依頼内容: 消毒装置に南の経年劣化 部品及び御見積 (殺菌チューブ類、ロケータ等)

装置 情報	交換後運転回数: 55	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 56	殺菌/消毒+7L: 755
	リークチェック: 800	自己洗浄: 785	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R元年 12 月 20 日

ご署名

安部

高林

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

2019.12.20

2019.12.20

青木

青木