

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 1 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300198
作業年月日	2020 年 1 月 15 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	片桐内科クリニック 様		TEL: 026-215-1900
所在地	長野県長野市上松4-33-7		ご担当 様
販売店	鍋林株式会社		ご担当 腰原 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし。

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 665
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
	☐			☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。下記装置情報付。2019/12/4からの運転情報となります。(液晶交換済)

装置情報	交換後運転回数: 22	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 3	殺菌/消毒+アル: 19
	リークチェック: 17	自己洗浄: 0	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2 1 月 15 日
〒380-0802 長野県長野市上松4-33-7

医療法人 片桐内科クリニック

ご署名 理事長 片桐 昌 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

026-24-2840 責任技術者	作業者
2020.1.15 青木	2020.1.15 青木